

# REMISS IMMUNOLOGISKA LABORATORIET MILJÖANALYS

Avsändare		Patient: personnummer, efternamn, förnamn
Remiss till Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska Immunologiska laboratoriet Box 7193 402 34 Göteborg tel 031-342 18 87		
Provtagningsdatum	Remitterande läkare	Provtagningsansvariges namn och telefonnummer
Provtagningsställe:		Debiteringsadress om annan än avsändaren
<b>Anamnes:</b> <input type="checkbox"/> Astma <input type="checkbox"/> Rhinit <input type="checkbox"/> Eksem		Hudtest: _____ Spec.IgE: _____ Husdjur: _____
<b>Önskad analys:</b> <input type="checkbox"/> Kvalster (d.pteron, d.farinae) <input type="checkbox"/> Hund <input type="checkbox"/> Katt <input type="checkbox"/> Häst		Övriga upplysningar:

## PROVTAGNING:

Provtagningsanvisningar, var god se baksidan.  
Bestämning av kvalster-, katt-, hund- och hästallergen i inomhusdamm.  
Provtagningsmaterial rekvireras från vårt laboratorium.


### Telefonnummer och faxnummer

Expedition, provsvar: 031 - 342 49 17  
Allergiavdelningen: 031 - 342 18 87  
Faxnummer: 031 - 82 67 91

Hemsida: [www.immunologi.se](http://www.immunologi.se)  
Mailadress: [kitm.su@vgregion.se](mailto:kitm.su@vgregion.se)

## INSTRUKTIONER FÖR DAMMPROVTAGNING TILL MILJÖANALYS

1) Sätt plastringen (packningen) på dammsugarröret, montera sedan på filterhållaren.

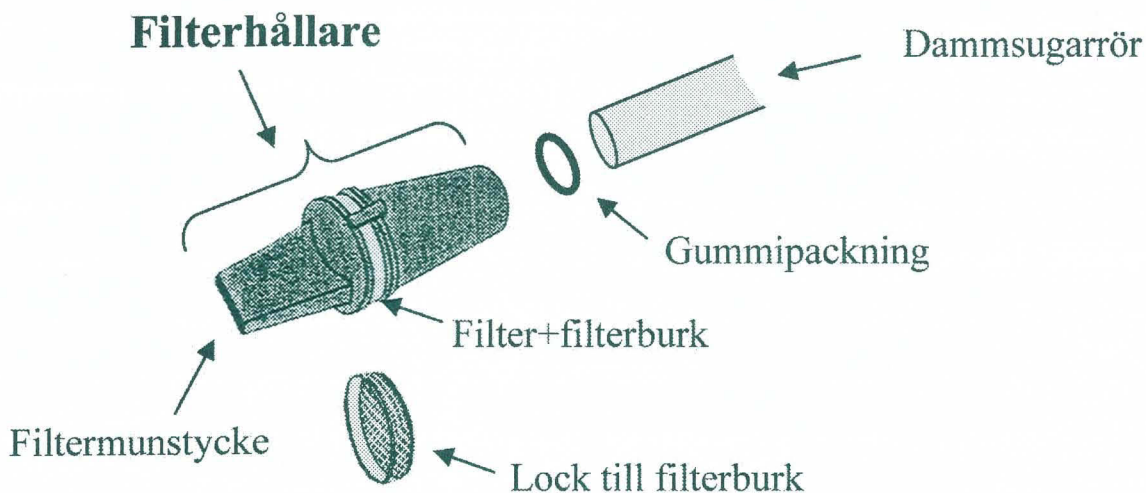

2) Dammsug 2,5 minuter på underlakanet. OBS: Lakanet skall inte vara bytt på 14 dagar.

3) Stäng av dammsugaren en stund och ta bort lakanet.

4) Dammsug 2,5 minuter på madrassen.

När det gäller kvalster dammsuger man enbart enligt punkt 1-4.

Vid övriga allergenbestämningar, t ex katt, hund eller häst kan man ibland dammsuga även soffa, fåtölj eller andra textilier.

Dammsug inga golvytor eller väggytor.

Blir filtret fort igentäppt, stäng då av dammsugaren och vänta ett tag innan Du fortsätter.

OBS! Om dammsugaren låter konstigt eller luktar bränt, stäng då av.

Vi ersätter inga dammsugarreparationer.

Kasta aldrig ett filter pga mycket damm, det är vanligt med stora mängder damm på filtren.

När Du dammsugit klart tar Du bort filterhållaren från dammsugarlangan så att inget damm flyger ut. Tag hand om packningen. Tag loss filtermunstycket och sätt locket på filterburken. Skriv datum, personnummer och namn på etiketten som sitter på locket.

Lägg alltsammans i en plastpåse och förvara i kylskåp tills det återlämnas.

Returnera materialet till remitterande instans..

**OBS: Återlämnandet måste ske inom en vecka efter dammsugning!**

**OBS! ALLA DELAR AV FILTERHÅLLAREN SAMT GUMMIPACKNINGEN OCH FILTERBURK MED LOCK MÅSTE ÅTERLÄMNAS TILLSAMMANS MED DAMMPROVET.**