

# REMISS IMMUNOLOGISKA LABORATORIET SEDIMENTERINGSPLATTOR

Avsändare		Provtagningsadress	
Debiteringsadress		Remiss till Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska Immunologiska laboratoriet Box 7193 402 34 Göteborg tel 031-342 18 87	
Provtagningsdatum	Remitterande läkare	Provtagningsansvariges namn och telefonnummer	
	Provtagningsställe		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Artbestämning önskas

## PROVTAGNING:

Provtagningsanvisningar, var god se baksidan.  
Provtagningsmaterial rekvireras från vårt laboratorium.

### Telefonnummer och faxnummer

Expedition, provsvar: 031 - 342 49 17  
Allergiavdelningen: 031 - 342 18 87  
Faxnummer: 031 - 82 67 91

Hemsida: [www.immunologi.se](http://www.immunologi.se)  
Mailadress: [kitm.su@vgregion.se](mailto:kitm.su@vgregion.se)

## Provtagningsföreskrifter för mätning av mögelsporer med sedimenteringsplattor

Plattorna bör användas inom en vecka från leveranstillfället. De skall förvaras i kylskåp, i plastpåse, tills mätning kan ske.

En extra platta skickas med (tejpad) som blank och skall **inte** öppnas. Den får stå i kylskåpet med de andra plattorna.

Vid provtagningen väljes en lämplig plats ut i det eller de rum som skall undersökas. Platsen måste vara fri från drag.

Placera plattan minst en meter från golvet, helst i höjd med patientens andningsvägar.

Lyft av locket på plattan och låt den stå i rumsluften i 20 minuter.

Blanken får också stå framme, men med tejpat lock.

### **OBS: AGARYTAN PÅ PLATTORNA FÅR INTE VIDRÖRAS!**

Efter 20 minuter sättes locket på och tejpas fast.

Fyll i remissen noggrant och märk plattan i botten med det nummer som motsvaras av provtagningsstället på remissen.

Efter mätning förvaras plattan/plattorna i plastpåse i rumstemperatur.

Plattorna skall så fort som möjligt skickas tillbaka till laboratoriet.

Även blanken skall skickas tillbaka.